

# 史赛克担架床



# 史赛克担架床

## 特点

- 备有升降七个高度
- 靠背架采用油压式操作
- 备有固定伸缩滴注器挂架
- 缩短车床可进入电梯内



# 史赛克担架床

## 轻便搬运车床规格

长度(标准) : 203厘米  
长度(缩短) : 155厘米  
阔度 : 58厘米  
高度 : 33至97厘米  
(七个高度)  
净重量 : 37公斤  
最重负载量 : 295公斤

- 车床高度在最低时切勿向横推动
- 不可作坐位使用



# 史赛克担架床



松开床栏手掣

床栏

三节式静脉输液挂杆

可折式床头部分

上落救护车胶轮

主架

底架管 (起落架)

轮锁

# 史赛克担架床



轮锁

# 史赛克担架床


拖把




床侧升降  
手掣



床尾升降  
手掣

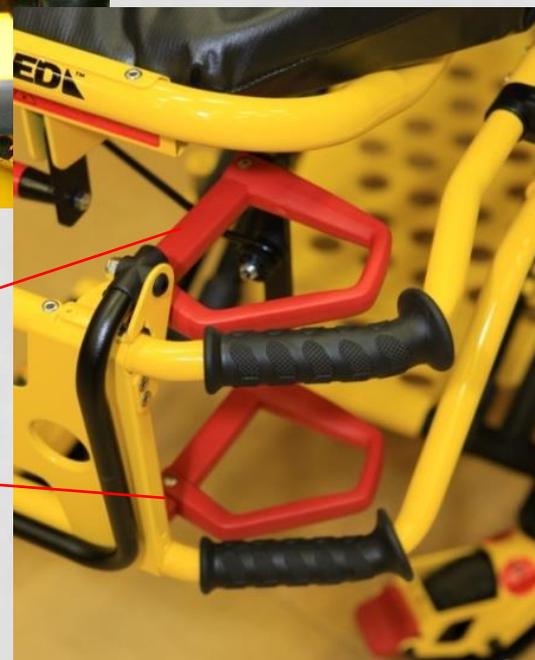

# 史赛克担架床

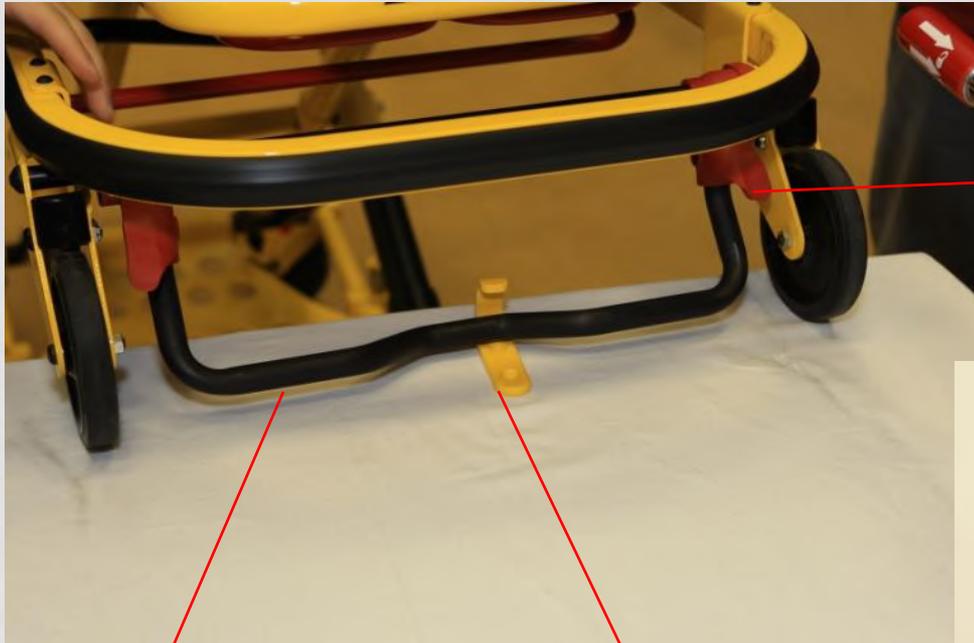

松开安全  
横杠手掣




安全横杠  
控制杆

在救护车  
之安全钩

上落救护车胶轮

# 史赛克担架床

靠背架

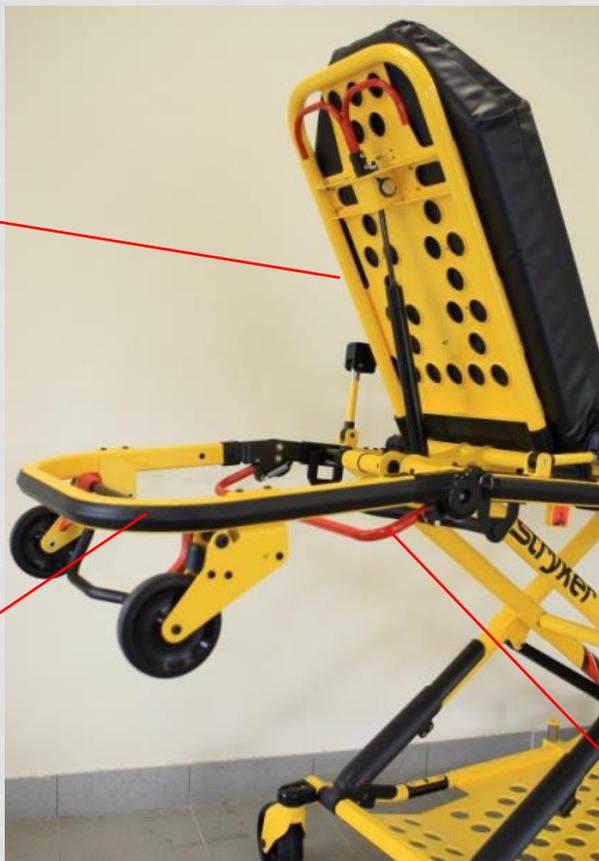

可折式  
床头

调校靠背架手掣



可折式床  
头手掣

# 史赛克担架床



可折式床头手掣



缩短车床后可进入升降机内



# 史赛克担架床



存放器材底架

四点式安全带 (上身)

安全带 (腰部)

安全带 (下肢)



# 使用步骤

## 三人双边法(基本方法)

- 1 将抬床移到伤者并排的身旁
- 2 用三人双边(中间的急救员在对边)单膝跪地法将伤者抱起放在膝上
- 3 待头部和足部的急救员移动一手紧托伤者腰臀部和用膝头支持伤者重量后
- 4 中间的急救员可以转到身后，拉放抬床置放在伤者身躯下
- 5 随后一同轻轻将伤者放下

(如有第四名急救员，则可将抬床由伤者头部移动放在身躯下)

# 使用步骤

## 前后扶抱法

1 用扶抱法抬起伤者后，第三名急救员可将抬床拉放在伤者身躯下

## 注意

1 置放伤者在台床上前，要先将抬床锁紧

2 将抬床拖摆放在伤者身躯下，便可以在不必要搬动伤者情况下，置放伤者在抬床上。

3 急救员要双手紧握著抬床，随后才松开手制，待头部的急救员发施号令后，才一同升降抬床

4 抬床要前后平衡才能作出稳妥暢顺的升降

5 降下抬床时，要稍为向上托起抬床，才更为容易松开手制